



Dokumentansvarig	Dokumentnamn			
Lina Malm	Lathund installation trygghetslarm			
Upprättad av	Upprättad	Reviderat	Uppföljning	Diarienumr
Lina Malm	20170605			

### Installation av Nya Neat Larm!

- Placera Larmet där kunden vill ha det, Stoppa strömsladden i kontakten.
- Tryck på On/Off knappen på undersidan av larmet
- Vänta tills alla lamporna blinkat en gång till
- och den lilla gröna lampan slocknat
- Provlarma från klockan, tryck länge, klockan skall lysa röd och sen grön
- Meddela att ni installerar Nytt larm- Klart

### Vill inte kunden att den Röda lampan lyser på larmet?

- Tryck till på On/Off knappen på undersidan av larmet, så att lamporna lyser
- Håll nere Röd knapp, tills larmet säger; Funktion Av- släpp knappen- Klart!



### Ändra volym på trygghetslarmet

- Tryck till på On/Off knappen på undersidan av larmet, så lamporna lyser
- Håll nere Grön knapp tills ljud hörs, släpp knappen
- Tryck åter ned Grön knapp, nu följer 3 olika ljudtoner, som visar vilka volym ljud som finns, släpp den gröna när ni hört det ljud som passar bäst. – Klart!

### Räckviddtest av Neo Larmklocka

- Tryck på On/Off knappen på undersidan av larmet, så lamporna lyser
- Håll in **Gul** tills Trygghetslarmet säger; Lägg till sändare, släpp knappen, tryck dig sedan fram med enkla tryckningar tills larmet säger Räckviddtest
- Bekräfta med **Röd** knapp
- Nu blinkar alla lampor
- Gå iväg och tryck på klockan för att se hur långt du kan gå, klockan lyser först röd, sen grön, så länge den gör det så fungerar larmet.
- När du är klar trycker du 2 gånger på **Grön** knapp

