



Ditt stöd
i vardagen

evondos[®]

Evondos läkemedelsautomat ett stöd i din vardag

Du kommer snart att få hem en läkemedelsautomat från Evondos. Den påminner dig när det är dags att ta ditt läkemedel. Den ger dig alltid rätt dos i rätt tid. Att ta dina läkemedel kan inte bli enklare och säkrare än så här!

Hur kommer min vardag att påverkas?

Säker läkemedelshantering. Läkemedelsautomaten förbättrar säkerheten av din läkemedelshantering. Den ger dig läkemedlet i den dos som läkaren har ordinerat och alltid i rätt tid. Den blir ett pålitligt stöd i din vardag.

Självständig vardag. Automaten hjälper dig ta dina läkemedel när det är dags, helt oberoende av vårdpersonalens tidsschema. Det gör att du kan planera din tid bättre och leva mer självständigt.

Ökar din flexibilitet. Att ha en läkemedelsautomat binder dig inte till ditt hem. Om du ska resa kan vårdpersonal hjälpa dig att ta ut rätt antal doser att ta med.

Koll på din läkemedelsbehandling. Vårdpersonalen kan se att du har tagit ditt läkemedel genom Evondos distansvårdssystem. När du har tagit en dos noteras det i en elektronisk loggbok.

Kvalitativ vård. När automaten ger dig ditt läkemedel, kan vårdpersonalen fokusera på dina andra behov och ni hinner samtala mer. Istället för renodlade läkemedelsbesök, kan vårdpersonalen fokusera på andra aspekter av ditt välmående.





Kan jag använda läkemedelsautomaten?

Automaten är enkel att använda. För att få ditt läkemedel trycker du bara på den stora knappen när den lyser grönt. Automaten säger till när det är dags att ta läkemedel. Den pratar, skickar ljudsignaler och visar skriftliga instruktioner på skärmen.



Vad händer om jag glömmer ta mitt läkemedel?

Automaten säger till när det är dags för läkemedel och påminner flera gånger om du är på väg att missa att ta din dos. Den gröna lampan lyser och volymen på påminnelserna blir starkare.

Om du ändå inte tar ditt läkemedel skickas det automatiskt ut ett larm till vårdpersonal som kommer hem till dig för att se vad som hänt och hjälper dig med läkemedlet.



Vad gör jag om automaten inte passar mig?

När du fått hem automaten behöver du inte oroa dig över hur den fungerar. Redan innan den levereras, får du prata igenom alla funktioner med vårdpersonalen.

De ser till så att du är bekväm med att använda automaten. När du väl har fått hem den får du träna med personalen en period. Därefter får ni utvärdera hur det har gått och om den fungerar bra för dina behov och i din vardag.



“Det är dags att ta ditt läkemedel, tryck på knappen.”



1 Tryck på den gröna knappen



2 Ta ut dospåsen ur automaten



3 Öppna påsen vid perforeringen



4 Ta ut läkemedlet ur påsen



5 Ta läkemedlet med ett glas vatten

evondos[®]

www.evondos.se

Telefon: 070 249 01 54

E-post: support@evondos.se